

Светильник бестеневой Дентал

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Распаковка светильника

Аккуратно откройте упаковку, не используя острых предметов!

В упаковке содержатся следующие компоненты:

Светильник

Пульт дистанционного управления

Набор для монтажа (тросики, потолочное крепление, грипера)

Ключ шестигранный L-образный SW2,5 DIN 911


Паспорт

Инструкция по эксплуатации


2. Размещение светильника

Светильник можно размещать двумя нижеописанными способами:

Параллельно. Глаза пациента должны быть направлены на 1/3 осветительного устройства

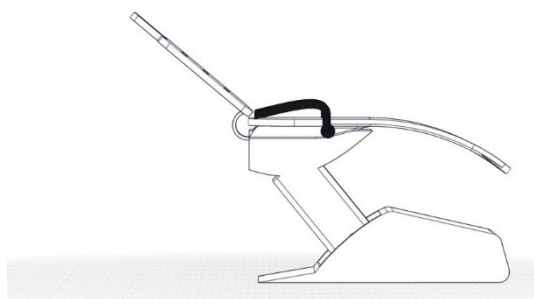

Крестообразно. Глаза пациента должны быть направлены на верхний источник света

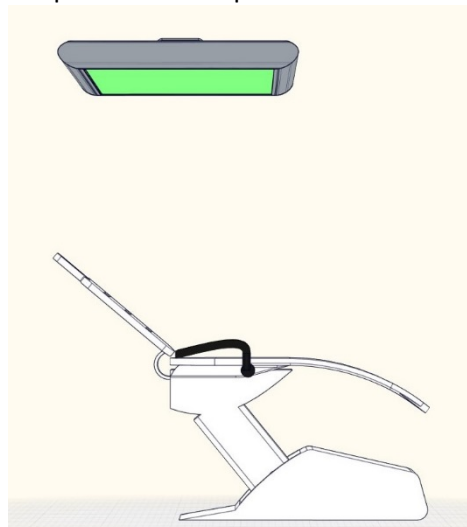


Светильник нужно размещать на высоте не менее 2,2 м над уровнем пола.

Для установки подвесной системы необходимо разметить на потолке 4 точки по углам прямоугольника размером 1000x565 мм

3. Крепление светильника к потолку

Светильник крепится к потолку по нижеприведенной схеме винтом диаметром 5 мм либо анкером со шпилькой М5. Перед подвешиванием светильника необходимо установить грипперы в специальные отверстия в корпусе.

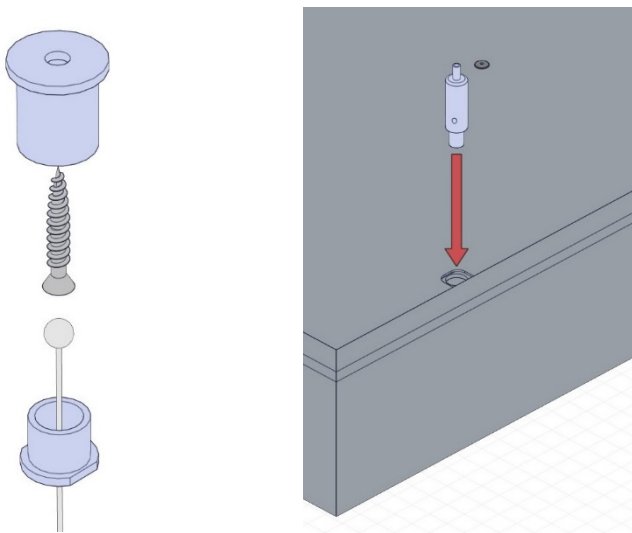

Подключить провода в соответствии с полярностью «коричневый» – фаза, «синий» – нейтраль, «желтый-зеленый» – заземление.

4. Работа светильника

Светильник включается/выключается при помощи пульта дистанционного управления. В случае потери или неисправности пульта, либо при проведении обслуживания (замены ламп) светильник может выключаться с помощью клавишного переключателя на корпусе.

Светильник бестеневой Дентал 6x54 ОЛ

- Пульт позволяет управлять включением 2 центральных ламп и 4 боковых независимо друг от друга путем нажатия кнопок «А» и «В» на пульте.

- Нажатие и удерживание кнопки «С» в течении 3 секунд активирует отложенное выключение.

После подтверждения приема сигнала кратковременным уменьшением яркости светильник выключится через 15 секунд.

- Нажатие кнопки «D» включает и выключает все лампы одновременно.



Светильник бестеневой Дентал 6x54 регулируемый.

- Функция диммера доступна с пульта дистанционного управления. Для плавного уменьшения яркости необходимо нажать и удерживать в нажатом состоянии кнопку В-, для увеличения – кнопку В+.

- Кратковременное нажатие кнопки «ВКЛ» выключает светильник, повторное нажатие включает его. Последние настройки диммера запоминаются и активизируются при последующем включении светильника.

- Светильник настроен только на 1 канал пульта (самый левый индикатор), при возникновении проблем с управлением убедиться, что пульт работает на канале 1 путем последовательного нажатия кнопки «CH» до активации канала 1 (загорания самого левого индикатора)

Примечание: если с помощью кнопки В- яркость светильника была уменьшена вплоть до отключения, то с помощью кнопки **ВКЛ/ВЫКЛ** светильник не включить. Включение светильника в данном случае, будет осуществляться с помощью кнопки **В+**. Нажмите и удерживайте кнопку **В+** вплоть до включения светильника.





5. Замена ламп

В светильнике используются люминесцентные лампы типа Т5 мощностью 54Вт. Для замены ламп необходимо выполнить следующие операции:

- Отключить светильник от сети

- Шестигранным ключом (в комплекте) открутить винты на задней крышке светильника.

- Снять заднюю крышку и извлечь лампу, повернув ее на 90 градусов по своей оси.

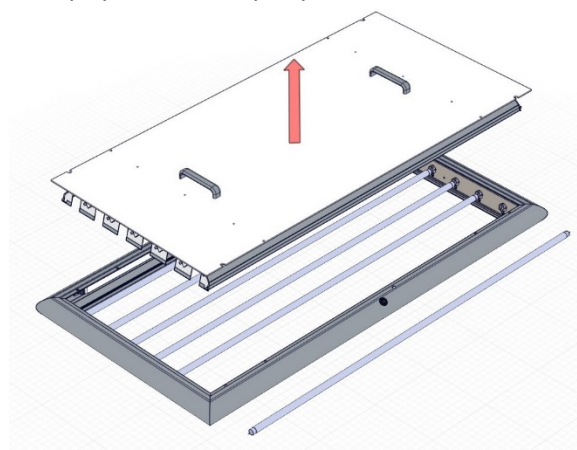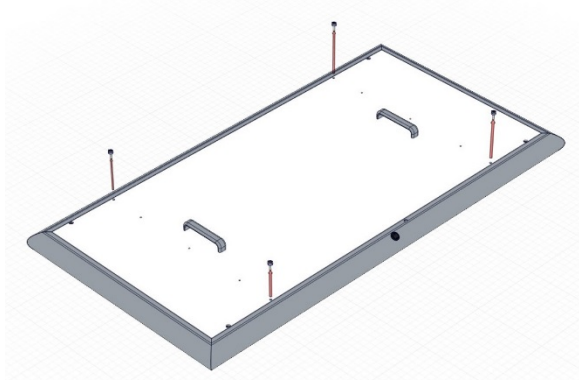

Сборка производится в обратной последовательности.